

Entnahme von Haarproben

Menge: Benötigt wird insgesamt eine mindestens bleistiftdicke Haarsträhne. Für einen Drogentest werden 2 bis 3 Haarsträhnen benötigt.

- Wählen Sie eine Haarsträhne am Hinterkopf aus und binden Sie diese mit einem Faden etwa 1 cm von der Haarwurzel entfernt zusammen.
- Schneiden Sie die Haare so nah wie möglich an der Kopfhaut ab und achten Sie darauf, dass die Schnur die Haare nach dem Abschneiden zusammenhält.
- Befestigen Sie jede Strähne auf einem Probenblatt, indem Sie an jedem Ende des Fadens ein Etikett (oder Klebeband) anbringen (nicht direkt auf die Haare kleben).
- Der Ansatz und die Haarspitzen müssen deutlich gekennzeichnet sein (auf dem Blatt vermerken).
- Legen Sie das Blatt in einen Umschlag (lichtgeschützt) und bewahren Sie es bei Raumtemperatur auf, bis es an das Labor geschickt wird.

Falls keine Kopfhare vorhanden sind, können auch andere Körperhaare entnommen werden.

Informationen bezüglich Haarfarbe, Färbungen oder anderer durchgeführter kosmetischer Behandlungen müssen mitgeteilt werden.