

Urotube- Urinprobenentnahme

Beimpfung eines Eintauchnährbodens



1. Urotube öffnen und den Nährbodenstreifen kurz in den Urin tauchen. Beide Seiten müssen vollständig eingetaucht sein, dürfen jedoch nicht länger als 10 Sekunden im Urin verbleiben.



2. Wenn die Urinmenge nicht ausreicht, um den Nährbodenstreifen zu bedecken, den Urin über beide Seitenflächen giessen.



3. Dann den Nährbodenträger hochziehen und sorgfältig über einem saugfähigen Papier abtropfen lassen, ohne den Nährboden zu berühren. Es darf kein Urin im Röhrchen sein.



4. Nährbodenträger zurück in das Röhrchen legen, gut verschliessen und die Probe beschriften (NAME, VORNAME, GEBURTSDATUM).

Urotube so schnell wie möglich an das Labor senden oder Urotube 24 Stunden lang bei 35–37 °C in einem Inkubator inkubieren.

Bei Keimwachstum Urotube so schnell wie möglich an das Labor senden.